

Skin Roller Professional Microneedle Therapy

Opis produktu:

Terapia mikroigłowa ARKANA SKIN ROLLER opiera się na wywołaniu naturalnego procesu regeneracji, dzięki tworzeniu mikroskopijnej wielkości nakuć. Stymuluje to przyspieszone procesy naprawcze tkanek, prowadzące do odmłodzenia skóry, spłycenia blizn, rozstępów i zniwelowania przebarwień. Dzięki tworzeniu mikrokanalików, wprowadzane serum oraz stosowane po zabiegu preparaty wnikają głębiej, szybciej i w większym stężeniu. Zabiegi z zastosowaniem rollera zwiększają przenikanie substancji czynnych przez warstwę rogową i naskórek aż do skóry właściwej do 3000 razy. Optymalna ilość igieł oraz specjalny ich kształt zwiększa intensywność zabiegów i głębokość nakuć. Intensywność zabiegu zależy od oczekiwanych efektów, okolicy poddanej zabiegowi i oraz indywidualnej reakcji skóry na zabieg. Czas trwania zabiegu mikronakłuwania to 5-20 minut. Intensywność zabiegu zależy od nacisku rollera na skórę, ilości powtórzeń w jednym miejscu oraz indywidualnej wrażliwości skóry na mikronakłuwanie.

ARKANA SKIN ROLLER jest przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użycia ARKANA SKIN ROLLERA.

Zestaw zawiera:

- Skin Roller
- Etui na produkt

Sposób użycia:

- Zabieg wykonywać na oczyszczonej, odtłuszczonej i zdezynfekowanej skórze.
- Opcjonalnie przeprowadzić eksfoliację lub wykonać piling kawitacyjny.
- Ruchem rolującym nakłuwać skórę od 4 do 10 razy w każdym kierunku (pionowym, poziomym i po przekątnej w jedną i w drugą stronę).
- Rolowanie zacząć od czoła, następnie policzki, nos, broda, szyja, dekolte.
- Nie dociskać rollera zbyt mocno do skóry. Kierować się odczuciami klienta oraz reakcją skóry na zabieg.
- Podczas mikronakłuwania aplikować kolejno na odpowiednie partie wybrane serum.
- Zaaplikować wybraną maskę.
- Po 20 min. maskę zdjąć w całości lub usunąć kompresem i zaaplikować wybrany krem/serum oraz krem z filtrem 50+.

Higiena zabiegu

Zabieg powinien przebiegać w warunkach higienicznych. Arkana Skin Roller jest zapakowany sterylnie i jest przeznaczony tylko dla jednej osoby. Osoba wykonująca zabieg powinna dokładnie umyć i zdezynfekować ręce oraz wykonywać zabieg w jednorazowych rękawiczkach. Przed zabiegiem skórę poddawaną zabiegowi należy zmyć i zdezynfekować.

Produkt przeznaczony tylko dla jednego klienta. Nieprzestrzeganie grozi przeniesieniem wirusowych chorób zakaźnych (WZW, HIV, HPV) oraz zakażeniem bakteryjnym lub grzybiczym.

Wskazania:

- Profilaktyka przeciwstarzeniowa.
- Odmładzanie i lifting twarzy.
- Niwelowanie rozszerzonych porów.
- Spłycanie zmarszczek i bruzd.
- Spłycanie i wygładzanie blizn i rozstępów.
- Wyrównanie kolorytu i rozjaśnianie przebarwień.
- Zmniejszenie teleangiektazji.
- Pojędrnianie ciała: ramiona, brzuch, pośladki, biust.
- Redukcja cellulitu.
- Wypadanie włosów.

Przeciwwskazania:

Choroby zakaźne skóry, choroby nowotworowe skóry, uszkodzona skóra, aktywny trądzik, aktywna opryszczka, stosowanie sterydów, leczenie retinoidami, chemioterapia i radioterapia, niewyrównana cukrzyca, skłonność do keloidów, trądzik różowaty, łuszczyca, zaburzenia krzepliwości, choroby o nieznanej etiologii, ciąża i okres karmienia. Zachować ostrożność w przypadku osób zażywających leki przeciwzakrzepowe oraz diabetyków. Przed zabiegiem nie powinno się zażywać również aspiryny i pić mocnej kawy.

Zalecenia pozabiegowe:

- Podczas zabiegu może pojawić się zaczerwienienie i obrzęk utrzymujące się do kilku godzin po zabiegu.
- Klientka może odczuwać pieczenie, szczypanie podobne do oparzenia słonecznego,
- Po kilku dniach może pojawić się suchość i/lub złuszczenie.
- Po zabiegu nie wolno opalać się, korzystać z sauny i basenu przez 24 godziny, przez 12 godzin nie wykonywać makijażu.
- Po zabiegu unikać mocnej kawy, alkoholu, pikantnych przypraw.
- Skóra po zabiegu wymaga intensywnej pielęgnacji preparatami regenerującymi i stymulującymi odnowę komórkową.
- Zaleca się ochronę przeciwsłoneczną kremem z filtrem UV 50+.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- W celu zapewnienia najwyższej efektywności Arkana Skin Roller może być wykorzystany maksymalnie 3 razy.
- Omijać okolice oczu.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Warunki przechowywania:

- Po zabiegu roller należy umyć i zdezynfekować w preparacie dezynfekująco-myjącym wg wskazań producenta środka.
- Po wysuszeniu umieścić w oryginalnym etui.

Producent:

ARKANA Cosmetics Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Północna 15-19

54-105 Wrocław

cok@arkana.pl

Wyprodukowano w Chinach